

ALCOPATROL AP5020

Alcoholímetro

Instrumento de detección rápida de alcohol. Utilizando el modo de prueba de detección rápida, se puede determinar si una persona ha consumido alcohol o no. Utiliza un sensor de célula de combustible que no reacciona con otras sustancias, lo que garantiza la precisión de la prueba.

Utiliza una técnica de medición profesional de flujo de gas, lo que garantiza que el sensor reciba solo el aire de los pulmones profundos que refleja correctamente el contenido de alcohol en sangre.


Es fácil de operar con tres botones. **Toma de muestras ilimitadas.**

ESPECIFICACIONES:

Fuente de Alimentación	Batería de Litio
Modo de prueba	Prueba rápida o Prueba pasiva.
Condición de Almacenamiento	Temperatura: 0°C a +55°C. Humedad: 30% a 90% de Humedad Relativa.
Transferencia de datos	Mediante USB a una PC.
Almacenamiento de datos	20,000 registros con identificación y marca de tiempo.
Medición, Rango y Precisión.	(BrAC) 0.000mg/L - 4.500mg/L
Calibración	Cada 12 meses



MODO DE USO:

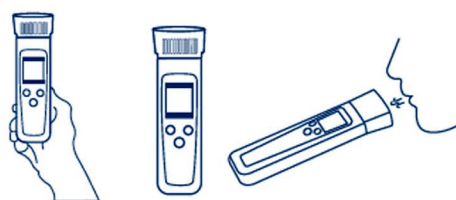

Resultados:

0.00%BAC

0.05%BAC

PRUEBA PASIVA:

Cuando la pantalla del dispositivo muestra "Listo", acerque el embudo de soplado del dispositivo lo suficiente a la boca y presione el botón "Iniciar" mientras la persona sometida a la prueba habla; el dispositivo tomará una muestra y la analizará.

PRUEBA ACTIVA:

Cuando la pantalla del dispositivo muestra "Listo" acerque el embudo de soplado del dispositivo lo suficientemente cerca de la boca de la persona sometida a la prueba y pídale que soplen en el embudo de soplado durante 1-2 segundos hasta que se escuche "Beep Beep". El dispositivo tomará una muestra y la analizará.

Si desea realizar la siguiente prueba, presione el botón de retroceso ". El dispositivo almacenará los datos anteriores y volverá a la interfaz del MENÚ PRINCIPAL.